


Great Lakes NOLA variable-pull hoofdkapje

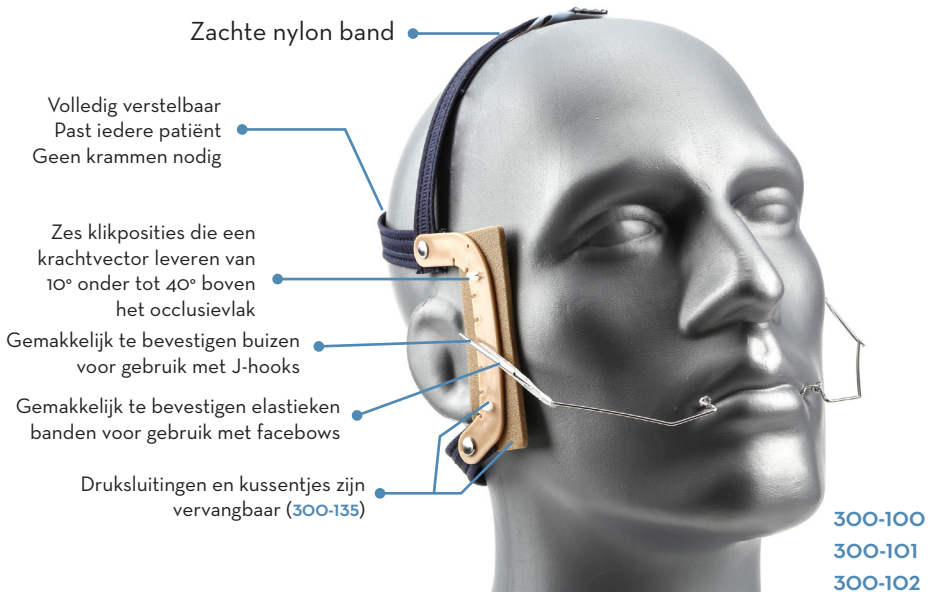

Zachte nylon band

Volledig verstelbaar
Past iedere patiënt
Geen krammen nodig

Zes klikposities die een
krachtvector leveren van
10° onder tot 40° boven
het occlusievlak


Gemakkelijk te bevestigen buizen
voor gebruik met J-hooks

Gemakkelijk te bevestigen elastieke
banden voor gebruik met facebows

Druksluitingen en kussentjes zijn
vervankelijk (300-135)

300-100
300-101
300-102

BESTELINFORMATIE AAN ACHTERKANT ►

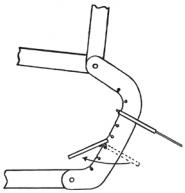

De trekrichting wordt bepaald door de positie van de J-hook met buis-eenheid op de plaat op het gezicht. Deze positie kan eenvoudig worden gewijzigd. De buis wordt verwijderd door hem 180° te draaien en de buishaak vervolgens uit het spiegel in de plaat op het gezicht te rollen.

Het veiligheidsvoordeel van de NOLA headgear met J-hook

In vergelijking met de breakaway apparaten die worden gebruikt met de momenteel verkrijgbare facebows, is J-hook Headgear even veilig of veiliger. Facebows zijn potentieel gevaarlijk omdat beide zijden zijn bevestigd en de uiteinden van de binnenkant op het gezicht gecentreerd zijn.

Bovendien kan bij de meeste breakaway apparaten de facebow uit de mond worden genomen voordat een afbreekkraft wordt bereikt.

De J-hook heeft de volgende voordelen:

1. De linker en rechter haak zijn niet verbonden. Als een van beide losraakt, wordt hij naar buiten en van het gezicht afgetrokken.
2. De voor- en achterwaartse beweging van de J-Hook wordt beperkt door het gebogen uiteinde en de gelaste elastiekhak. (afb. A)



Afb. A

ITEM	BESTELNR.
Hoofdkapjes, J-hooks en accessoires	
Variable-pull hoofdkapje (5/pak)	Zwart 300-100 Marineblauw 300-101 Bruin 300-102
High-pull hoofdkapje (5/pak)	Zwart 300-107 Marineblauw 300-103 Bruin 300-105
Quick-fit hoofdkapje (5/pak)	300-104
J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: (5 paar/pak)	300-121
J-hook voor premolaarretractie (5 paar/pak)	300-122
J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: Lang (5 paar/pak)	300-123
High-pull retractie-J-hook (5 paar/pak)	300-125
High-pull retractie-J-hook: Lang (5 paar/pak)	300-126
Roestvrijstalen buizen voor variable-pull hoofdkapje (10/pak)	300-131
Opklikbare buizen voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)	300-132
Opklikbare haken voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak)	300-133
Opschuifbare stoffen kussentjes (20/pak)	300-134
Opklikbare kussentjes voor alle hoofdkapjes (20/pak)	300-135
Protractie-headgear en vervangingsonderdelen	
Klein facemask	300-306
Groot facemask	300-307
Kleine Hickam	300-308
Grote Hickam	300-309
Hoofdband voor Hickam (beide groottes)	300-312
Voorhoofdsband en borgmoeren voor facemask (beide groottes)	300-313
Borgmoeren voor voorhoofdsband (2/pak)	300-314
Plastic beschermtips (10/pak)	300-316

BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN! Om het risico op oogletsel te voorkomen, dient u de patiënten en ouders op de hoogte te stellen van de juiste veiligheidsvoorzorgen bij het plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw patiënten ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
GREAT PEOPLE. GREAT PRODUCTS. GREAT LAKES.