


Die Great Lakes Reverse-Pull-Gesichtsmasken

Komfortable Passform . . . Komfortabler Preis

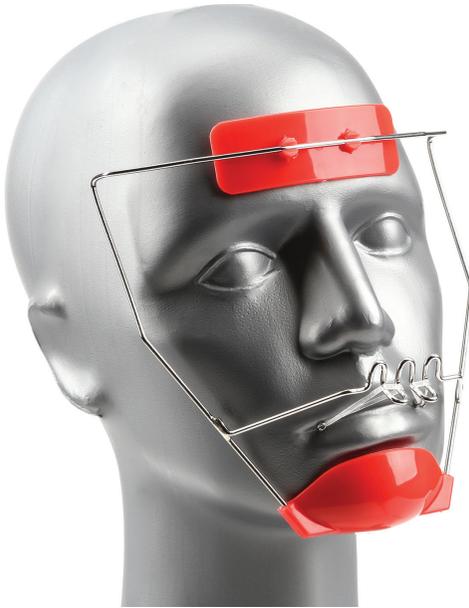

Nur zum einmaligen Gebrauch

Erhältlich in Hellbraun, Blau, Rot, Hot Pink und Lila in Klein, Mittel und Groß.

BESTELL-NR.

Farbe	Klein	Mittel	Groß
Hellbraun	GTS	GTM	GTL
Blau	GBS	GBM	GBL
Rot	GRS	GRM	GRL
Hot Pink	GPKS	GPKM	GPKL
Lila	GPRS	GPRM	GPRL

Robuste Headgear-Tasche mit Reißverschluss in schwarz erhältlich. Bestell-Nr. 830.

Geleinlage für Stirnteil und Kinnkappe maximiert den Tragekomfort (LATEXFREI)

Die abwaschbare, wiederverwendbare Geleinlage reduziert wirksam:

- Reibung
- Hautabschürfung
- Scherkraft
- Druck

Stirnauflege

- Größer und damit angenehmer für den Patienten.
- Bruch sichere Clips lassen sich sicher am Rahmen befestigen.
- Aus leichtem Kunststoff gegossen.

Mundbogen

- Auf eine Drahtstärke von 0.075" verstärkt.
- Verbesserte Stabilität und verbesserte Zugkraft.
- Wird mit der von Ihnen gewählten intraoralen Verankerung verwendet.

Kinnkappe

- An den Rahmen angelötet, um Rotationen zu vermeiden.
- Größere Ausführung der Kappe für verbesserten Patientenkomfort.
- Aus leichtem Kunststoff gegossen.

Aufgrund der leichten Edelstahlkonstruktion und der an das Gesicht angepassten Form sind keine Kopfbänder mehr nötig.

Vollständige Sicht

- Keine visuellen Einschränkungen.
- Kann auch mit Brille getragen werden.

Justierpunkte

- Gewährleisten eine perfekte Passform für jede Gesichtsform.

Funktion

- Klasse III: Vorwärtszug, um den Oberkiefer nach vorne zu ziehen.
- Klasse II: Vorwärtszug auf den Unterkiefer. Hervorragend geeignet, um Zähne (einzeln oder in Zahngruppen) nach vorne zu bewegen.

Gummizüge: 5/16" X Starke Gummibänder (latexfrei)

7.9mm-8oz. (100/Pkg.)

Gummizüge: werden nicht in Kanada verkauft

Anweisungen zur individuellen Anpassung

(A) JUSTIERUNG UND ANPASSUNG

(B) Damit die Gesichtsmaske beim Schlafen nicht verrutscht, muss sie eng an den Konturen von Stirn und Wangen anliegen. Justierungen sollten vorgenommen werden, indem an den Punkten A und/oder B eine Justierzange verwendet wird.



*Justierzange 220-022

(C) Anpassbar an ein längeres oder kürzeres Gesicht. Für maximalen Oberflächenkontakt sollte das Polster über den Augenbrauen liegen, was dem Patienten die Möglichkeit gibt zu sprechen, ohne die Gesichtsmaske abzunehmen.

(D) Die Vorrichtung sollte nicht gegen das Jochbein drücken.

(E) Richten Sie das Gitter des Mundbogens direkt an den Zähnen aus, knapp unterhalb der Mundlinie. Dieser leichte Druck nach oben bietet der Gesichtsmaske einen festeren Halt.

(F) Leichte Justierungen nach oben oder nach unten können zur Anpassung an die individuelle Unterkieferposition und/oder Kinnmuskulatur notwendig sein.

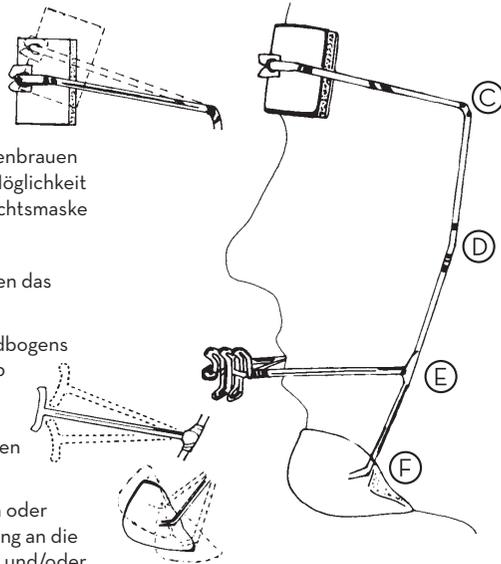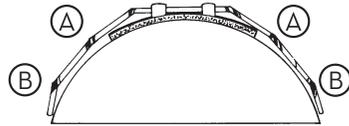

Reverse-Pull-Gesichtsmaske

Die Reverse-Pull-Gesichtsmaske wurde ursprünglich für die Behandlung von Oberkieferfehlstellungen und Unterkieferprognathien entwickelt. Als unsere Kunden von zusätzlichen Anwendungen für den Vorwärtzug der Maske berichteten (Klasse II und Schließen von Lücken), wurden Verfeinerungen vorgenommen. Eine Kinnkappe wurde hinzugefügt, um die Stabilität zu verbessern. Der Rahmen wurde modifiziert, um ein Verrutschen auch während des Schlafens zu verhindern. Der Mundbogen wurde neu gestaltet, um die Zugkraft zu erhöhen und die Patientensicherheit zu verbessern.

Rücksendungen nach 30 Tagen unterliegen einer Rücknahmegebühr von 15%, es sei denn, der Artikel wurde beim Versand beschädigt oder irrtümlich verschickt. Dies gilt nicht für Sonderanfertigungen.

WICHTIGE ERINNERUNG FÜR ÄRZTE!

Um das Risiko von Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie Patienten und Eltern über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen beim Anlegen und Abnehmen des Headgears informieren. Warnen Sie die Patienten auch vor wildem oder riskantem Spielen, solange der Headgear getragen wird.



Great Lakes[®]
DENTAL TECHNOLOGIES

200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. Great Lakes.