
Maschere di Delaire a trazione inversa Great Lakes

Vestibilità confortevole A un prezzo conveniente

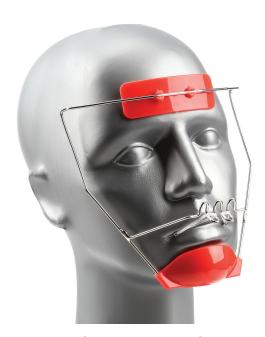

Solo per uso singolo

Disponibile in marrone chiaro, blu, rosso, rosa shocking e viola. Taglie disponibili: Piccolo, Medio e Grande.

N. ORDINE

Colore	Piccolo	Medio	Grande
Marrone chiaro	GTS	GTM	GTL
Blu	GBS	GBM	GBL
Rosso	GRS	GRM	GRL
Rosa shocking	GPKS	GPKM	GPKL
Viola	GPRS	GPRM	GPRL

Custodie per apparecchio disponibili......830

La guarnizione in gel per la mentoniera e la fronte massimizza il comfort (SENZA LATTICE)

La guarnizione in gel lavabile e riutilizzabile riduce in maniera efficace:

- Frizione
- Abrasioni
- Forza di taglio Pressione

Appoggio frontale

- · Più ampio per un maggiore comfort del paziente.
- · Clip antirottura per un aggancio sicuro al telaio.
- · Modellato in plastica leggera.

Arco per bocca

- Filo di calibro aumentato fino a 0,075".
- · Migliore stabilità e tensione potenziale.
- Utilizzato a seconda del proprio ancoraggio intraorale.

Mentoniera

- Modellata in base al telaio per eliminare la rotazione.
- Design della mentoniera più ampio per un maggiore comfort del paziente.
- · Modellato in plastica leggera.

Grazie alla costruzione in acciaio inossidabile leggero e al montaggio conforme al viso non sono più necessarie le fasce per la testa.

Visibilità completa

- · Nessuna ostruzione visiva.
- · Può essere indossata con gli occhiali.

Punti per la regolazione


 Garantisce una vestibilità perfetta per ogni tipo di volto, a prescindere dalla forma.

Funzionamento

- Classe III: trazione in avanti per spostare l'arcata mascellare anteriormente.
- Classe II: trazione in avanti sulla mandibola.
 Eccellente per spostare i denti (singoli o un gruppo di essi) in avanti.

Elastici: 5/16" Elastici X Heavy senza lattice 7,9mm-8oz. (100/pacco)

Elastici: non è possibile la vendita in Canada

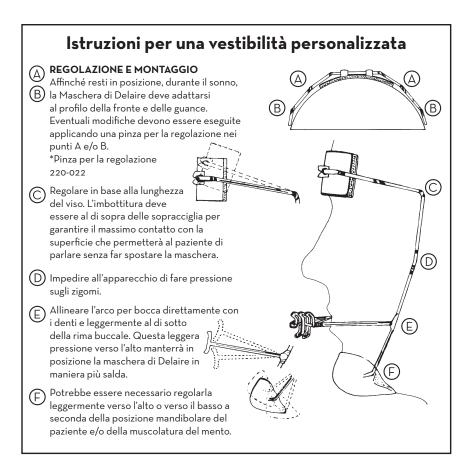

Maschera di Delaire a trazione inversa

La Maschera di Delaire a trazione inversa è stata inizialmente progettata per il trattamento delle insufficienze mascellari e del prognatismo mandibolare. Quando i nostri clienti ci hanno segnalato ulteriori applicazioni per la trazione in avanti della maschera (Classe II e chiusura degli spazi), sono state apportate delle migliorie. È stata aggiunta una mentoniera per migliorare la stabilità. Il telaio è stato modificato al fine di impedire lo spostamento anche durante il sonno. L'arco per bocca è stato riprogettato al fine di aumentare la tensione potenziale e la sicurezza per il paziente.

l resi dopo 30 giorni sono soggetti a una commissione di rifornimento del 15% a meno che l'articolo non risulti danneggiato durante la spedizione o sia stato spedito per errore. Ciò non si applica ai dispositivi realizzati su misura.

AVVISO IMPORTANTE PER I MEDICI!

Per evitare lesioni oculari, assicurarsi di aver informato i pazienti e i genitori in merito alle adeguate precauzioni di sicurezza quando si indossa e si rimuove l'apparecchio. Mettere in guardia i pazienti sui rischi derivanti da giochi violenti o pericolosi quando si indossa l'apparecchio.

